



Bij storingen kunt u bellen naar  
0182 - 624 990

## GEBRUIKSAANWIJZING DREAMER


### Handbediening

- |   |      |   |
|---|------|---|
| Rugverstelling omhoog                                     | ▲  ▼ | Rugverstelling omlaag                                     |
| Beenverstelling omhoog                                    | ▲  ▼ | Beenverstelling omlaag                                    |
| Autocontour omhoog (rugleuning en bovenbeenvlak tegelijk) | ▲  ▼ | Autocontour omlaag (rugleuning en bovenbeenvlak tegelijk) |
| Bed omhoog  | ▲  ▼ | Bed omlaag  |
|   | ▼    | Comfortzit/ relaxfauteuil                                 |




### Blokkeerfunctie

(op de achterkant van de handbediening)

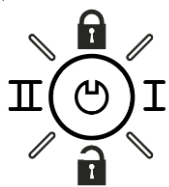

- GEBLOKKEERD; alle functies vergrendeld
- I / II / VRIJ; alle functies ontgrendeld

### Bedieningspaneel voor verpleging

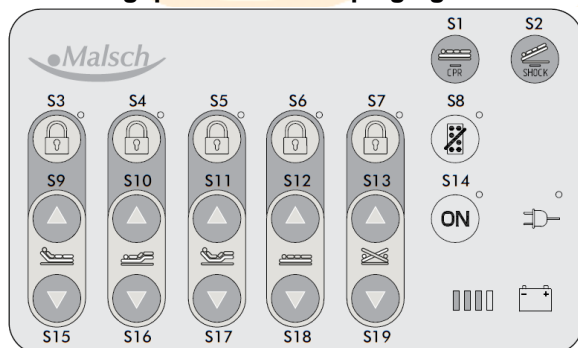

- S1** CPR  
**S2** Shockpositie  
**S3/ S4/ S5/ S6/ S7** Functies blokkeren (LED =rood)  
**S8** Handbediening blokkeren  
**S14** Bedieningspaneel aan  
**S9/ S15** Rugverstelling ↑ ↓  
**S10/S16** Beenverstelling ↑ ↓  
**S11/S17** Autocontour ↑ ↓  
**S12/ S18** Bedhoogte ↑ ↓  
**S13** Anti- Trendelenburg ↑ ↓  
**S19** Trendelenburg ↑ ↓



Fabrikant:  
**Betten Malsch GmbH**  
Rohbergstraße 9  
36208 Wildeck-Obersuhl  
Duitsland

Bij storingen kunt u bellen naar  
0182 - 624 990

### Remmen en rijden

Het bed is verrijdbaar op iedere hoogte. De wielen van het bed kunnen centraal geblokkeerd worden via een centraal rempedaal. Deze bevindt zich in het midden van het onderstel aan het voeteneinde. Pedaal naar onder: centrale blokkering van de wielen  
Pedaal in het midden: 4 wielen 360° ontkoppeld  
Pedaal naar boven: richting van 1 wiel geblokkeerd



### Mogelijke storingen

Indien de Dreamer niet werkt, raadpleeg dan onderstaande tabel om de storing op te sporen en te verhelpen. Wanneer u het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met Doove Care Groep.

PROBLEEM	MOGELIJKE OPLOSSING
De aandrijvingen reageren niet op de handbediening	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of het netsnoer goed aangesloten is</li> <li>- Controleer of er spanning op het stopcontact zit</li> <li>- Controleer of de steekverbindingen van de motor en de handbediening goed vast zitten</li> <li>- Controleer of de handbediening of aandrijving defect is; neem contact op met Doove Care Groep</li> <li>- Controleer of de schakelaar op de achterkant van de handbediening niet op "vergrendeld" staat</li> </ul>
Elektromotorische instellingen gebeuren niet correct	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer de bewegende delen en verwijder vreemde voorwerpen</li> <li>- Verminder de belasting indien de veilige werklast wordt overschreden</li> </ul>
Aandrijvingen stoppen na continu gebruik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insteltijd of veilige werklast is overschreden, sturing heeft gereageerd op oververhitting; laat het aandrijfsysteem afkoelen</li> </ul>
De functies van de handbediening reageren omgekeerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of de bekabeling correct is aangesloten of neem contact op met Doove Care Groep</li> </ul>
De onrusthekken kunnen niet meer correct worden ingesteld	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer de bewegende delen en verwijder vreemde voorwerpen of neem contact op met Doove Care Groep</li> </ul>
Rem van de wielen werkt niet of de wielen lopen niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwijder vreemde voorwerpen</li> <li>- Het systeem van de wielen is defect; neem contact op met Doove Care Groep</li> </ul>